

Debubblelizer (zsírtalanító)

500 ml-es üveg 125 ml-es pumpás szóróüveggel

Alkalmazás:

Használat előtt felrázandó!

Használat után jól visszazárandó!

A száraz szilikon lenyomatokat a gipsszel vagy mintaanyaggal történő kiöntés előtt, valamint a viaszos és mintázó viaszos részeket a beágyazás előtt Diaswiss Debubblelizer termékkel 15-20 cm-es távolságból takarékosan és egyenletesen be kell fújni. Ennek során a modellt a porlasztott anyagba tartva forgatni kell. Nedves foltok keletkezését el kell kerülni. Nedves folt kezelteként a Debubblelizer fölösleges mennyiségét enyhe levegőfújással meg kell szárítani. A beágyazás előtt a Debubblelizer terméknek teljesen meg kell száradnia az öntési egyenetlenségek elkerülése érdekében. A Debubblelizer biztosítja a széli részek pontos kiöntését, és megkönnyíti a buborékmentes öntvény elkészítését. A modell kiöntésekor a finom retenciók és kapocs részek teljes részletgazdagsággal ábrázolódnak.

Óvintézkedések:

- Gyújtóforrásoktól távol tartandó!
- A helyiséget jól át kell szellőztetni.
- A gőzöket nem szabad belélegezni.
- Védőszemüveget kell viselni.
- Az oldószereknek ellenálló védőkesztyűt kell viselni.
- A környezeti levegőt át nem engedő védőmaszkot kell viselni.

Jellemzők:

Diaswiss Debubblelizer csökkenti a szilikon és viasz anyagok felületi feszültségét, és elősegíti a nedves mintaanyag jobb illeszkedését az egyébként víztaszító felületekhez.

Kis mértékben gyúlékony!

Tárolás:

A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Gyártó:

DIASWISS S.A. ✱ Rte de St Cergue 293 ✱ CH-1260 Nyon ✱ Tel.: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14