

Surgicut Precision Tissue Trimmer

Fecha de creación: 06.11.2014
Última fecha modificada: 21.11.2017



**Imagen de ejemplo*

Ámbito de aplicación:

corte de tejido blando oral sin sangrado respectivamente sangrado mínimo. Exclusivamente para el uso en piezas de mano FG odontológicas.

Modalidad de aplicación:

Procesamiento (limpieza, desinfección y esterilización), favor ver instrucción de procesamiento separada.

Antes de cualquier uso se debe verificar la integridad de la punta de la parte activa. Para un rendimiento óptimo recomendamos revoluciones de destino comprendidas entre 30.000 – 300.000 min⁻¹ (rpm) Para aprovechar el efecto cauterizante del instrumento no se desea refrigeración por agua al cortar! Insertar instrumento en la cavidad bucal únicamente con la velocidad de revolución prescrita. Se debe prestar atención a las indicaciones del fabricante de la turbina.

Por favor también mantenga en cuenta nuestras recomendaciones generales adicionales para de uso la aplicación de instrumentos rotatorios dentales (www.diaswiss.ch).

Advertencias:

evitar palanqueo y atascamiento (peligro de quiebra). La presión de contacto y la velocidad dependen de la topografía de la mucosa. Solamente utilizar en dirección/manera contemplada. Prestar atención a las indicaciones del fabricante de la turbina. No almacenar el instrumento en bolsas plásticas. Preferiblemente almacenar seco a temperatura de ambiente. Antes de eliminar instrumentos defectuosos o gastados estos se deben esterilizar para evitar la transmisión de enfermedades.

Calidad:

acerado inoxidable, cuerpo de perfil y vástagos endurecidos, dióxido de circonio estabilizado con itrio comprobado.

Riesgos:

Al utilizar correctamente no hay riesgos.

Eliminación:

Instrumentos inutilizables deben de esterilizarle antes de eliminarlos de acuerdo a las normas clínicas.

CE 1250

Rev. 11/17



DIASWISS S.A.
Rte de St Cergue 293
CH-1260 Nyon
Switzerland