

Occlusion és Diascan spray

Alkalmazási terület:

Szájon kívüli használatra!

Occlusion spray

Korai érintkezési és illesztési munkálatok láthatóvá tételéhez koronák és hidak esetében.

Diascan spray

Illesztési munkálatokhoz teleszkópos és rögzítési munkálatok esetén, illetve csillogó felületek hajlításánál a vizsgálati folyamat előkészítésére.

Alkalmazási mód:

Használat előtt felrázandó. Szórási távolság kb. 3-5 cm. Enyhe, szakaszos, rövid szórási löket a szórandó tárgy egyidejű forgatásával. Fedőanyag felvitelére nincs szükség. Ecsettel, vízgőzzel, ill. vízszugár alatt könnyen eltávolítható. A gipsz elszíneződésétől nem kell tartani.

Minőség:

Ultrafinom permet. A szokásos okklúzió spray-ekkel ellentétben az Diaswiss Occlusion és a Diascan spray nem oldódik vízben; így a gipszmodellek nem színeződnek el a felszívott színes víz miatt.

Kockázatok:

Kerüljék a permet belélegzését.

Tárolás:

- A palack nyomás alatt áll.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és robbanásveszélynek.
- Védje az 50 °C fölé történő felmelegedés ellen.

Ártalmatlanítás:

Az általános laboratóriumi hulladékkal (fémdobozok).

Gyártó:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14