

Laboratóriumi cirkon eszközök

Alkalmazási terület:








Szinterelt cirkon-dioxid megmunkálása, esetenként nincs szükség vízűtésre. Durva formázás és polírozás.

Alapvető:







Minden olyan eszközhöz, amely az egyes gyémántszemet szabad szemmel felismeri, megfelelő vízűtés szükséges. Minden esetben kerülje a szikraképződést.

Alkalmazási mód:






Felületkezelés cirkon

HST cirkon gyémánt	Mikromotor 25'-30 000 ford./perc, alacsony lenyomóerő	
Diazircon coarse	9848 G 040 // mikromotor 3' – 18 000 ford./perc, alacsony lenyomóerő 9507 G 110 // mikromotor 3' – 18 000 ford./perc, alacsony lenyomóerő	 
Poli-Max I	800HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 801HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő	 
Poli-Max II	810HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 811HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő	 



Előpolírozás cirkon

Diazircon medium	9848 035 // mikromotor 3' – 15 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 9502 060 // mikromotor 3' – 15 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 9777 170 // mikromotor 3' – 8 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 9507 110 // mikromotor 3' – 5 000 ford./perc, közepes lenyomóerő	   
Poli-Max III	820HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 821HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő	 

Csillogó polírozás cirkon

Diazircon polish	9507 C 050 // mikromotor 3' – 5 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 9500 C 150 // mikromotor 3' – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő	 
Poli-Max Supergloss	830HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 831HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő 832HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő	  

Felületkezelés cirkon (nyersanyag)

Poli-Max 2- Fázis	850HP // mikromotor 3' – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő csiszoló / fehér rész. befejező / kék rész.	
Poli-Max 2- Fázis, finomra	840HP // mikromotor 3' – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő csiszoló / szürke rész. befejező / fehér rész.	

Laboratóriumi cirkon eszközök

Felületkezelés és Előpolírozás / Lítium-Disilicate kerámia

Poli-Max III 820HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő
821HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő



Csillogó polírozás / Lítium-Disilicate kerámia

Poli-Max Supergloss 830HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő
831HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő
832HP // mikromotor – 10 000 ford./perc, közepes lenyomóerő



Kockázatok:

Kerüljék a finom cirkon por belélegzését!

Gyártó:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 01/17