

IVA-3.3 h Gebrauchsanweisung rotierende zahnärztliche Werkzeuge (FG Diamanten, FG Diamanten Reduzierer und Tiefenmarkierer, FG Turbo- schleifer, FG Diamanten Microprep, Perio Instrumente, FG Präzisionswerk- zeuge mit Führungspin und Swiss Goldies)

Ausgabe: 001

Anwendungsbereich: Rotierendes Werkzeug zum Beschleifen von Zahnstümpfen.
Kavitäten- und Kronenstumpfpräparation (Zahnhartsubstanz)
Für Füllungsmaterialien, Komposite (nur harte, nicht zähe Werkstoffe)

Anwendungsweise: Die Werkzeuge sind *vor jedem Gebrauch* mit dem Heißdampfverfahren
bei 134°C / 30 Minuten zu sterilisieren.
Für optimale Leistung die empfohlenen Richtdrehzahlen
von 30.000 – 300.000 min⁻¹ (UpM) einhalten.
Bei Präparationen an Zähnen stets mit Minimum 50ml/min spülen.
Hebeln, Verklemmen und hohe Temperaturen sind zu vermeiden.(Bruchgefahr)
Instrumenten ab Kopfdurchmesser 3,1mm oder größer muß die Kühlung auf
Minimum 150ml/min erhöht werden.

Qualität: Gleichmäßige 2-Lagen, bei Piranhas 3-Lagen Diamantierung.
Rostfreie, gehärtete Profilkörper und Schäfte.

Risiken: Die Diamanten sind in einer Nickelschicht eingebettet.
Es sind keine allergischen Reaktionen von Patienten bekannt.

Hersteller:  * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * +41223015600
PRECISION DENTAL INSTRUMENTS