

Adhesive spray (Tapadóspray)

Alkalmazási terület:

A **Diaswiss Adhesive spray** (tapadóspray) helyettesíti a beágyazómassza-modell egyébként szokásos keményítő merülőfürdőjét a modellöntési technikában.

Alkalmazási mód:

Használat előtt felrázandó. Vágja le és szárítsa meg a beágyazómassza-modellt 40-es előmelegítő kemencében, min. 800 C-on. A adhesive spray (tapadóspray) felvitele előtt teljesen szárítsa meg. Helyezze a még kézmeleg, száraz modellt egy darab papírra, és fújja be egyenletesen kb. 10-15 cm távolságról. Szükség esetén vigye fel legfeljebb kétszer. A felvételek között várjon egy percet. Kerülje a túlzott felvitelt és a tócsaképződést. Ellenkező esetben a modellöntvény protézis nem fog megfelelően illeszkedni

Minőség:

A adhesive spray (tapadóspray) nagyon vékony, jól tapadó réteget képez a modell felületén, így nagyon precíz illesztést tesz lehetővé. A benyomott viasz segédrészek szilárdan tapadnak, és nem válnak le a beágyazó massza rezgésekor, amikor feltölti a kemencét. A már rögzített részek gond nélkül korrigálhatók. A tartók már nem gyűlnek össze. A modellezés kifinomultabb, mivel a segédrészek nehézkes viaszozása megszűnt.

Kockázatok:

Kerüljék a permet belélegzését. Vigyázat – gyúlékony.

Tárolás:

- A palack nyomás alatt áll.
- Ne tegyék ki közvetlen napsugárzásnak, robbanásveszély

Ártalmatlanítás:

Az általános laboratóriumi hulladékkal (fémdobozok).

Gyártó:

DIASWISS S.A. ✱ Rte de St Cergue 293 ✱ CH-1260 Nyon ✱ Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14