

## Surgicut

Data creării: 06.11.2014  
Data ultimei modificare: 21.11.2017



*\*Exemplu de imagine*

### Domeniu de aplicare:

Tăierea țesutului moale intraoral fără sângerare sau cu sângerare minimă. Pentru utilizarea exclusivă cu piese de mână dentare FG.

### Mod de aplicare:

Pentru reprocesare (curățare, dezinfectare și sterilizare) vezi instrucțiunile separate privind reprocesarea.

Înainte de fiecare utilizare se verifică integritatea vârfului instrumentului. Pentru o performanță optimă respectați turațiile orientative recomandate de 30.000 – 300.000 min-1 (rpm). Pentru a folosi efectul cauterizant al instrumentului la tăiere, nu este dorită răcirea cu apă! Introduceți instrumentul în cavitatea bucală numai cu turația prescrisă. Respectați indicațiile producătorului de turbină.

Vă rugăm să respectați și recomandările noastre suplimentare generale de utilizare pentru utilizarea instrumentelor stomatologice rotitoare. ([www.diaswiss.ch](http://www.diaswiss.ch))

### Indicații de avertizare:

Se va evita forțarea, bruscare (pericol de rupere). Presiunea de apăsare și viteza se orientează după topografia mucoasei. Utilizați numai în direcția/modul prevăzut. Respectați datele producătorului de turbină. Nu depozitați instrumentul în pungi de plastic. Cel mai bine păstrați-l uscat la temperatura camerei. Înainte de eliminarea instrumentelor defecte sau uzate acestea trebuie sterilizate, pentru a preveni contaminările încurcate.

### Calitate:

Oțel inoxidabil, corpuri profilate și tije călite. Dioxid de zirconiu stabilizat cu ytriu.

### Pericole:

În cazul utilizării corespunzătoare nu există pericole.

### Eliminare:

Instrumentele nefolosibile trebuie sterilizate înainte de eliminarea corespunzătoare în clinică.

CE 1250

Rev. 11/17



DIASWISS S.A.  
Rte de St Cergue 293  
CH-1260 Nyon  
Switzerland